

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器

輸液用アクセサリセット 70326001

## コネクタキャップ

(ハードケースタイプ)


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

&lt;構成&gt;

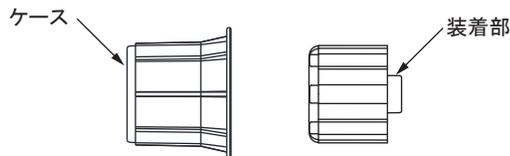

### 【使用目的、効能又は効果】

輸液セットのメスコネクタ等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

1. ケースを手を持ち、フィルムのふたを完全に剥がします。
2. ケースの外側から本品を保持し、本品をメスコネクタ等のロック部に回転させながらねじ込み、メスコネクタ等の開口部を被覆します。
3. ケースをまっすぐ取外します。

### 使用方法に関連する使用上の注意

- 本品をメスコネクタ等と装着する際は、過度な締め付けをしないこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損する可能性がある。]
- 本品を装着させた状態で過度な負荷をかけないこと。[本品の外れ及び緩みにより、内容液が漏れる可能性がある。]

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
- 併用する医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- 本品を鉗子等で摘まないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
- 本品は、異物混入を防ぐものであるため、内容液の無菌性を保持する目的で使用しないこと。
- 本品を薬液等を長期保存する目的で使用しないこと。
- 使用中装着部の緩み、液漏れ破損等に注意すること。

#### 2. その他の注意

- 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。
- 装着部を直接手で触れないこと。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

### 2. 使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

### 【包装】

200個/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806