

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

## コネクタキャップ

(ハードケースタイプ)


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

<構成>

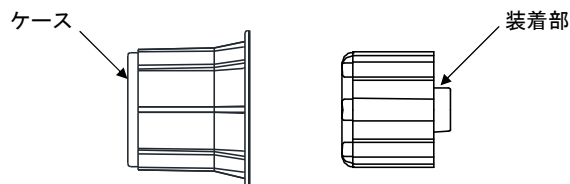

### 【使用目的又は効果】

輸液セットのメスコネクタ等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

### \*【使用方法等】

1. ケースを手を持ち、ふたを完全に剥がします。
- \*2. ケースの外側から本品を保持し、本品の装着部をメスコネクタ等のロック部に回転させながらねじ込み、メスコネクタ等の開口部に、緩みや外れが生じないように確実に装着します。
3. ケースをまっすぐ取り外します。

### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品をメスコネクタ等と装着する際は、過度な締めつけをしないこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損する可能性がある。]
- 本品を装着させた状態で過度な負荷をかけないこと。[装着が緩み、本品が外れたり、内容液が漏れたりする可能性がある。]

### \*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 包装を開封したらすぐに使用すること。
  - 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
  - 本品を鉗子等で挟まないこと。[破損が生じ、液漏れ、エアの混入を引き起こす可能性がある。]
- \*● 本品は菌の繁殖防止および輸液セット等の内容液の効力維持に有効なものではない。
  - 使用中は装着部の緩み、液漏れ破損等に注意すること。
2. その他の注意
  - 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。
  - 装着部を直接手で触れないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
  - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
  - 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元  
株式会社ジェイ・エム・エス  
電話番号：082-243-5806