

医4 整形用品

一般医療機器

単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS 覆布

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布製品である。不織布の単層構造、不織布／ラミネートフィルムの二層構造、及び不織布／ラミネートフィルム／不織布の三層構造のいずれかの構造を有する。手術部位を露出させるための穴がある規格とない規格がある。又、穴がある規格には穴部周囲の裏面に固定用テープが貼付されているものもある。

【使用目的、効能又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取り出します。
- 2.テープ付規格の場合は裏面の固定用テープをはがします。
- 3.対象部位を覆います。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープ等で固定します。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 消毒用アルコールを使用する場合には、注意すること。[本品の染料が溶け出し、身体に付着する可能性がある。]

2.その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

1～100枚入／箱

(箱の入数表示を参照)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806