

医4 整形用品

一般医療機器

単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS穴あきシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に患者の体の一部分を覆う不織布製品である。表面：不織布／裏面：ラミネートフィルムの二層構造を有する。手術部位を露出させるための穴があいており、穴部の裏面の周囲に固定用テープが貼付されている製品もある。

【使用目的、効能又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取り出します。
- 2.裏面の固定用テープをはがします。
- 3.手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定します。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

2.その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

20～100枚入／箱

(箱の入数表示を参照)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806