

医4 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS オイフパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】
●再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】
製造販売元及び製造元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806

【形状、構造及び原理等】
手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布（覆布）を複数組み合わせることで包装したものである。
<覆布の形状及び構造等>

形状	構造	その他
穴なし	単層（不織布）	—
穴あり	二層（不織布＋ラミネートフィルム）	—
	三層（不織布＋ラミネートフィルム＋不織布）	固定用テープ付

※その他処置用の器具及び材料が構成される場合がある。
※固定用テープは穴部周囲の裏面に貼付される。

【使用目的、効能又は効果】
手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】
1.包装から本品を取出します。
2.裏面の固定用テープをはがします。
3.対象部位を覆います。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープ等で固定します。

【使用上の注意】
1.重要な基本的注意
●包装を開封したらすぐに使用すること。
●包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
●消毒用アルコールを使用する場合には、注意すること。[本品の染料が溶け出し、身体に付着する可能性がある。]
2.その他の注意
●使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1.貯蔵・保管方法
●水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2.使用期限
●使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】
2～50セット入／箱
(箱の入数表示を参照)