

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMSオイフパック


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布製品(以下に示す構成品)を複数組み合わせて包装したものである。不織布製品の構造は、不織布の単層構造、不織布／ラミネートフィルムの二層構造、及び不織布／ラミネートフィルム／不織布の三層構造のいずれかの構造を有する。組み合わせ内容については包装の表示に記載している。

〈構成品(代表例)〉

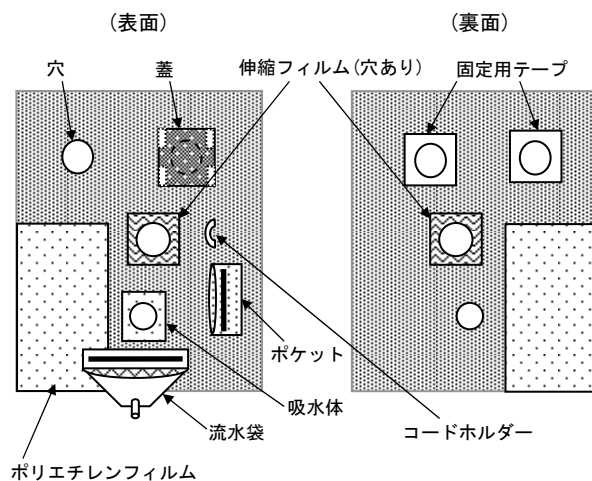

1. 覆布

単層、二層、及び三層のいずれかの構造を有し、また、一部分を透明なポリエチレンフィルムで置き換えた規格もある。手術部位を露出させるための穴がある規格とない規格がある。穴がある規格には、穴部表面に蓋が貼付されていたり、穴部周囲の裏面に固定用テープが貼付されている規格がある。

2. 全面覆布

二層又は三層の構造からなり、一部分を透明なポリエチレンフィルムで置き換えた規格もある。手術部位を露出させるための穴がある規格とない規格がある。穴がある規格には、穴部表面に蓋が貼付されていたり、穴部周囲が伸縮フィルムであったり、穴部周囲の表面が吸水体であったりする規格もある。また、穴部周囲の裏面に固定用テープが貼付されている規格もある。

その他、次の部品が付く規格もある。

部品	用途
流水袋	患者の排液等を排出する経路を確保する。
ポケット	鉗子、セ션等の小型の医療機器を一時的に収納する。
コードホルダー	各種チューブ類を束ねる。

3. 覆布テープ

単層又は二層構造を有する。裏面に剥離紙を有した固定用テープが貼付されている。

*〈付属品(医療機器非該当品)〉

本書における名称	構成品名
器械台カバー	器械台カバー、器械台シート、台敷、メイヨスタンドカバー
スケール	紙スケール
ガウン	ガウン
ポケット	ポケット
マスク	マスク
キャップ	ヘアキャップ

*〈原材料〉

構成品			原材料
覆布	覆布部	単層	パルプ、ポリエステル
		二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布、レーヨン系不織布
	蓋	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
	固定用テープ		アクリル系粘着剤、紙
全面覆布	覆布部	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布、レーヨン系不織布
	蓋	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
	固定用テープ		アクリル系粘着剤、紙
	伸縮フィルム		ポリウレタン
<u>マスク</u>			ポリプロピレン、ポリウレタン、 <u>ポリエチレン</u>
キャップ			ポリプロピレン、レーヨン

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

包装から本品を取り出します。

〔覆布、全面覆布〕

- 裏面の固定用テープの剥離紙をはがします。
- 対象部位を覆います。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープ等で固定します。

〔覆布テープ〕

裏面の剥離紙をはがし、覆布に貼付し、覆布同士を貼り合わせます。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

*〔覆布、全面覆布〕

可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。〔乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。〕

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

*〔覆布、全面覆布〕

引火

〈その他の注意〉

〔覆布、全面覆布〕

消毒用アルコールは可能な限り、本品に付着しないように注意すること。〔本品の染料が身体に付着するおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年〔自己認証（当社データ）による〕

包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806