

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

J M S 全面覆布

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布製品である。不織布／ラミネートフィルムの二層構造、又は不織布／ラミネートフィルム／不織布の三層構造を有し、また、一部分を透明なポリエチレンフィルムで置き換えた規格もある。手術部位を露出させるための穴がある規格とない規格がある。穴がある規格には、穴部表面に蓋が貼付されていたり、穴部周囲が伸縮フィルムであったり、穴部周囲の表面が吸水体であったりする規格もある。また、穴部周囲の裏面に固定用テープが貼付されている規格もある。

その他、次の構成部品が付く規格もある。

構成部品	用途
流水袋	患者の排液等を排出する経路を確保する。
ポケット	鉗子、セッシ等の小型の医療機器を一時的に収納する。
コードホルダー	各種チューブ類を束ねる。

〈構成(代表例)〉

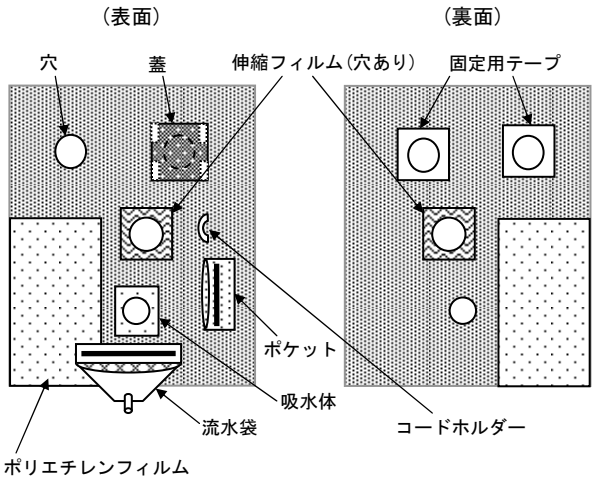

・ 本品は以下の原材料を使用している。

部位	原材料
覆布部	二層 ポリエチレン
	三層 ポリプロピレン系不織布、レーヨン系不織布
蓋	二層 ポリエチレン
	三層 ポリプロピレン系不織布
固定用テープ	アクリル系粘着剤、紙
伸縮フィルム	ポリウレタン

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. 固定用テープ付規格の場合は裏面の固定用テープの剥離紙をはがします。
3. 対象部位を覆います。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定します。

*【使用上の注意】

*〈重要な基本的注意〉

可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。[乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。]

〈その他の注意〉

消毒用アルコールは可能な限り、本品に付着しないように注意すること。[本品の染料が身体に付着するおそれがある。]

*〈不具合・有害事象〉

その他の不具合
引火

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
電話番号：082-243-5806