

医4 整形用品

一般医療機器

単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## 覆布テープ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状、構造及び原理等】

不織布製の手術用サージカルドレープの裏に、両面テープを貼付している。

本品には滅菌済品と未滅菌品の2規格がある。

### 【使用目的、効能又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1.本品を包装から取出します。
- 2.未滅菌品の場合は、高圧蒸気滅菌を施します。

### 【使用上の注意】

#### 1.重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形などの異常が認められる場合は使用しないこと。

#### 2.その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

#### 2.使用期限

- 箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（自社データ）により設定〕

### 【包装】

1～200枚入／箱

（箱の入数表示を参照）

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806