

医4 整形用品

一般医療機器

医療用不織布 34655000

JMS 圧迫綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

不織布からなる円筒状又は円盤状の被覆・保護材である。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取出します。
- 2.未滅菌品の場合は、高圧蒸気滅菌を施します。
- 3.穿刺部を押さえるようにしてテープ等で固定します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 未滅菌品を高圧蒸気滅菌する場合は、130℃以下で行うこと。[131℃以上で行った場合は本品が変色する可能性がある。]
- 穿刺部を過度に押さえないこと。又、定期的に圧迫部を確認すること。[血管や周囲の組織を傷める可能性がある。]

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2.その他の注意
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
 - 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 2.使用期限
 - 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

10～500個入／箱
(箱の入数表示を参照)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806