

器54 医療用捲綿子

一般医療機器

医科用捲綿子 10172000

JMS 綿棒


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

木材のロッドにセルロース繊維等の各種繊維からなるプレジェットを取付けている。

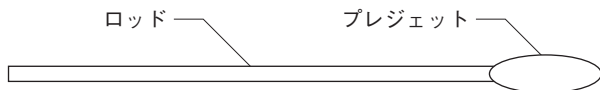

【使用目的、効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布するために使用する。治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とする。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取出します。
- 2.未滅菌品の場合は、高圧蒸気滅菌を施します。
- 3.薬剤の塗布を行う場合は、プレジェットに薬剤を含ませます。

使用方法に関連する使用上の注意

- 未滅菌品を高圧蒸気滅菌する場合は、130℃以下で行うこと。[131℃以上で行った場合は本品が変色する可能性がある。]
- 軸に力を入れすぎたり、軸を強く押ししたりしないこと。[軸が折れる可能性がある。]

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形などの異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
- #### 2.その他の注意
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

*【包装】

100～3,000本入／箱*

(箱の入数表示を参照)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806