

医4 整形用品

一般医療機器

医療用不織布 34655000

JMSガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

セルロース製不織布ガーゼである。

本品には滅菌済品と未滅菌品の2規格がある。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.包装から本品を取出します。
- 2.未滅菌品の場合は、高圧蒸気滅菌を施します。
- 3.創傷又は外科切開部の処置に使用します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 未滅菌品を高圧蒸気滅菌する場合は、130℃以下で行うこと。[131℃以上で行った場合は本品が変色する可能性がある。]

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 未滅菌品を創傷部に使用しないこと。
- 手術で使用する際は、体内への留置がないよう注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

2.その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2.使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

1~3,000枚入/箱

(箱の入数表示を参照)

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806