

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

ナデシコインサター


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

<構成>

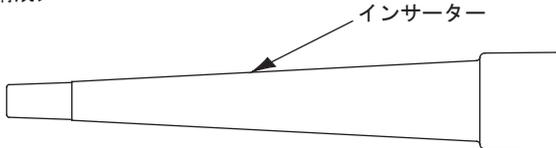

【使用目的、効能又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる器具をいう。

【品目仕様等】

破断強度：5N以上

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. ガイディングカテーテルの二方活栓もしくは止血弁に本品を挿入します。
3. 十分湿潤させたマイクロカテーテルを本品に挿入します。
4. マイクロカテーテルが血管内に挿入されたことを確認したのち、本品を二方活栓もしくは止血弁より抜きます。
5. 抜いた本品をマイクロカテーテルのストレインリリーフまで移動させ、ストレインリリーフに被せて固定します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- マイクロカテーテルを挿入する際に、先端がつかえたり、少しでも抵抗がある場合は無理に挿入しないこと。[マイクロカテーテルが破損、切断する可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 本品をガイディングカテーテルに挿入した状態で、ガイディングカテーテルの二方活栓を操作しないこと。[本品及びマイクロカテーテルが破損、切断する可能性がある。]
 - 本品をメスやハサミ等で損傷しないよう注意すること。
2. 併用医療機器
 - 本品は「ナデシコ」（医療機器承認番号：21200BZZ00459000）以外のマイクロカテーテルに使用しないこと。[他社製品用に設計されていないため、使用の安全性は確認されていない。]
3. その他の注意
 - 使用後は、感染、汚染等に注意し廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光をさけて常温で保管すること。

2. 使用期限

- 包装又は箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）により設定]

【包装】

25本入／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806