

医療用品3 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

JMSプラスチック手袋パウダーフリー（滅菌済）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

●再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は左右一対で包装され、エチレンオキサイドガスにより滅菌された手袋である。

主 材 料	ポリ塩化ビニル (可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
パ ウ ダ	なし

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するポリ塩化ビニル製手袋である。

【品目仕様等】

試験項目	老化前	老化後
引張強さ MPa	8.0以上	8.0以上
切断時伸び %	300以上	300以上

【使用方法等】

1.包装から台紙ごと手袋を取出します。

2.台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取出して装着します。

使用方法に関連する使用上の注意

●手袋は無菌的に装着すること。

●刃物等鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりする可能性があるので注意すること。

【使用上の注意】

1.使用注意

●かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。〔体質により上記の症状が現れる可能性がある。〕

2.重要な基本的注意

●包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。

●薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるので確認の上、使用すること。

●使用中に本品が破れた場合は、新しい製品に交換すること。

3.その他の注意

●使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

●水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

2.使用期限

●箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証(当社データ)により設定〕

【包装】

25双 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806

製造元

キャノパス メディカル サプライ

(Canopus Medical Supply Co.,Ltd.)

国名：台湾