

医療用品3 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

## プラスチックグローブ パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

左右兼用タイプの手袋である。

主材料	ポリ塩化ビニル (可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
パウダ	なし

### 【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するポリ塩化ビニル製手袋である。

### 【品目仕様等】

試験項目	老化前	老化後
引張強さ MPa	8.0以上	8.0以上
切断時伸び %	300以上	300以上

### 【操作方法又は使用方法等】

取出し口より手袋を取出して装着します。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりする可能性があるため注意すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。[体質により上記の症状が現れる可能性がある。]

#### 2. 重要な基本的注意

包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。

薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるため確認の上、使用すること。

手袋の主材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性があるため、60 以上の熱いものに触れないこと。

使用中に本品が破れた場合は、新しい製品に交換すること。

#### 3. その他の注意

使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

#### 2. 使用期限

箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

### 【包装】

100枚/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806

製造元

徐州 フル サン メディカル プロダクツ

(XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS LTD.)

国名：中華人民共和国