

医療用品4 整形用品

一般医療機器

単回使用クラスⅠ処置キット 33961001

消毒キット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、不織布ガーゼ等からなる。なお、製品により構成品の組み合わせは異なる。

<構成(代表例)>

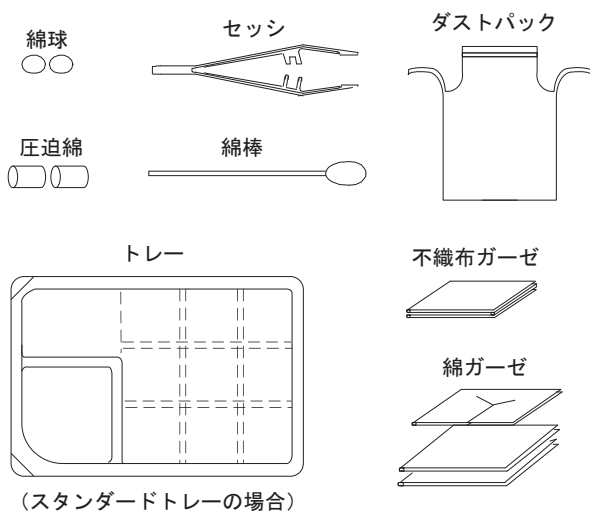

【使用目的、効能又は効果】

一般的な消毒処置を迅速に行うために必要なクラスⅠの医療用不織布、医療ガーゼ等をプレパッケージしたキットである。

【操作方法又は使用方法等】

1. フタをはがし、包装を開封します。(構成物が飛び出さないように注意します。)
2. 適宜、構成品を取り出し使用します。
以下に構成品の一般的な使用方法を記載します。
- 3) 不織布ガーゼ
余分な薬液等の拭き取りや傷口の被覆に使用します。
- 4) 綿ガーゼ
傷口を覆います。
- 5) 綿球
セッシでつまみ、薬液等に浸して広範囲の消毒を行います。
- 6) 圧迫綿
穿刺傷を覆い、圧迫させて止血を行います。
- 7) 綿棒
直接薬液等に浸して消毒を行います。
- 8) セッシ
ガーゼや綿球等をつまみます。
- 9) ダストパック
廃棄する使用済の構成品を入れます。
- 8) トレー
薬液等の注入皿として使用します。

9) テープ

傷口を覆ったガーゼや圧迫綿を固定します。

10) シーツ

処置台等を覆います。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 余った構成品は使用しないこと。
2. その他の注意
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光をさけて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

30セット/箱(スタンダードトレイ)

24セット/箱(ラージトレイ)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号: 730-8552

電話番号: 082-243-5806