

## 消毒キット

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】


- 再使用禁止

### \*【形状・構造及び原理等】


本品は、以下に示す構成品の2品目以上の組み合わせからなり、付属品を任意に組み合わせたものである。\*

### <構成品>\*

不織布ガーゼ

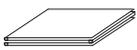

綿ガーゼ

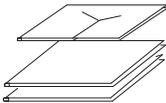


綿球



圧迫綿



綿棒

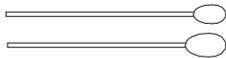


救急絆創膏\*




### <付属品>\*


トレイ

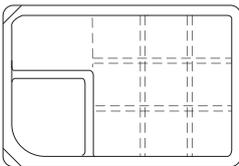

ダストパック

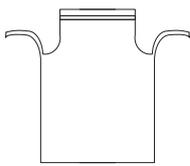

テープ

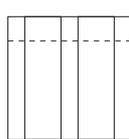

セッシ



シート



### \*【使用目的、効能又は効果】

一般的な創面の処置、被覆、保護を迅速に行うために必要なクラス I の医療用不織布、医療ガーゼ、圧迫綿、救急絆創膏等をプレパッケージしたキットである。\*

### \*【操作方法又は使用方法等】

1. フタをはがし、包装を開封します。(構成物が飛び出さないように注意します。)
2. 適宜、構成品を取り出し使用します。  
以下に構成品及び付属品の一般的な使用方法を記載します。\*
- 1) 不織布ガーゼ  
余分な薬液等の拭き取りや傷口の被覆に使用します。
- 2) 綿ガーゼ  
傷口を覆います。
- 3) 綿球  
セッシでつまみ、薬液等に浸して広範囲の消毒を行います。
- 4) 圧迫綿  
穿刺傷を覆い、圧迫させて止血を行います。
- 5) 綿棒  
直接薬液等に浸して消毒を行います。

### 6) 救急絆創膏\*

傷口の被覆及び保護に使用します。\*

### 7) トレー

薬液等の注入皿として使用します。

### 8) ダストパック

廃棄する使用済の構成品を入れます。

### 9) テープ

傷口を覆ったガーゼや圧迫綿を固定します。

### 10) セッシ

ガーゼや綿球等をつまみます。

### 11) シーツ

処置台等を覆います。

### \*【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したらすぐに使用すること。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 救急絆創膏及びテープの使用時、発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、ただちに使用を中止すること。\*
- 余った構成品は使用しないこと。

#### 2. その他の注意

- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光をさけて保管すること。

#### 2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

### 【包装】

30セット/箱(スタンダードトレイ)

24セット/箱(ラージトレイ)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号: 730-8652

電話番号: 082-243-5806