

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001

消毒キット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

以下に示す構成品のうち、2 品目以上の構成品を組み合わせて構成する。組み合わせ内容については包装の表示に記載している。

**〈構成品〉

本書及び包装における名称	構成品名
ガーゼ	JMS SBガーゼ、JMSガーゼ、尺角ガーゼ、ヒールスポンジ、クリンスカットⅡ
綿球	綿球
綿棒	JMS綿棒
圧迫綿	JMS圧迫綿
救急絆創膏	オーキューバンエコ NS、チューシャパン NS、インジェクションパッド NS

**〈付属品(医療機器非該当品)〉

本書及び包装における名称	構成品名
セッシ	セッシ
シート	シート
ダストパック	ダストパック
テープ	テープ
トレイ	トレイ

**〈原材料〉

構成品	原材料
ガーゼ	綿、レーヨン、ポリエステル
綿球	綿
綿棒	綿
圧迫綿	綿、ポリエチレン、ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル
救急絆創膏	レーヨン不織布、ポリエステル不織布、ポリオレフィン不織布、アクリル系粘着剤
シート	ポリエチレン、ポリプロピレン、バルブ不織布、セルロース
テープ	アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

一般的な創面の処置、被覆、保護を迅速に行うために必要なクラス I の医療用不織布、医療ガーゼ、圧迫綿、救急絆創膏等をプレパッケージしたキットである。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、構成品を取り出し使用します。
2. 構成品の使用方法是以下のとおりです。

〔ガーゼ〕

創傷又は外科切開部の処置に使用します。

〔綿球、綿棒〕

薬物を塗布する、又は液を除去するために使用します。

〔圧迫綿〕

穿刺部を押さえるようにしてテープ等で固定します。

〔救急絆創膏〕

創部にパッドをあて周りのテープ部分で固定します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

〔綿棒〕

軸に力を入れすぎたり、軸を強く押したりしないこと。〔軸が折れるおそれがある。〕

〔救急絆創膏〕

本品をはがす際は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

**〔救急絆創膏〕

本品の使用中に貼付部位で感染又は皮膚障害（発疹、発赤、水疱、皮膚剥離、そう痒感等）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

〈不具合・有害事象〉

**1. その他の不具合

**〔綿棒〕

破損

2. その他の有害事象

**〔救急絆創膏〕

発疹、発赤、水疱、皮膚剥離、そう痒感、感染

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年〔自己認証（当社データ）による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 03-6404-0602