

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

J フィット グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

左右兼用タイプの手袋である。

主 材 料	ポリ塩化ビニル (可塑剤：フタル酸ジイソノニル、テレフタル 酸ジオクチル)
パ ウ ダ	なし

*【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するポリ塩化ビニル製手袋である。本品は未滅菌である。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出して装着します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。[体質により上記の症状が現れるおそれがある。]
2. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。
3. 手袋の原材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損するおそれがあるため、60℃以上の熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

1. 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

〈有効期間〉

1. 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806

製造業者

徐州 フル サン メディカル プロダクツ

(XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS LTD.)

国名：中華人民共和国