

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

プラスチックグローブ F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

左右兼用タイプの手袋である。パウダ付とパウダーフリーの 2 種類がある。(パウダの材質: コーンスターチ)

主 材 料	ポリ塩化ビニル(可塑剤: フタル酸ジイソノニル)
-------	--------------------------

<性能>

試験項目	老化前	老化後
引張強さ MPa	8.0 以上	8.0 以上
切断時伸び %	300 以上	300 以上

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用するポリ塩化ビニル製手袋である。

【使用方法等】

1. 取出し口より手袋を取出して装着します。
2. パウダ付の場合は、手袋のパウダを滅菌水等で除去します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があいたりするおそれがあるので注意すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - (1) かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。[体質により上記の症状が現れるおそれがある。]
2. 重要な基本的注意
 - (1) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。
 - (2) 手袋の主材料であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損するおそれがあるため、60℃以上の熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - (1) 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。
2. 有効期間
 - (1) 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
電話番号: 082-243-5806