

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000


アンカーレーズブラシⅡ

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・無理な角度や過度の加圧はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

形状：円状（断面）の軸にブラシが植立している。下図参照

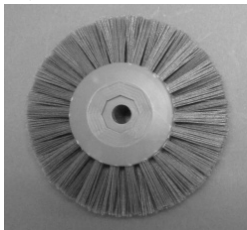

寸法

測定部位	規格値（mm）
直径	72.0 ± 1.0
軸径	33.0 ± 1.0
作業部ブラシ（毛）の長さ	20.0 ± 1.0

主成分 軸部：プラスチック、
ブラシ（毛）部：特殊化学繊維

梱包：10個／袋

【使用目的又は効果】

歯科補綴物等の研磨、研削に用いる。

【使用方法】

歯科用技工回転機器に装着し、回転させ、ソフトタッチで断続的に被研削物に軽く押しつけて研削、研磨する。

【使用上の注意】

1.) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2.) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3.) 使用注意

- ・歯科用駆動装置または歯科用技工回転機器（レーズエンジンメーカー）の指定に従って確実に装着して使用すること。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除くこと。
- ・ブラシ部が開いたものやブラシ部が消耗し短くなったものは研磨屑や粉塵を多量に飛散させる可能性があるので使用しないこと。
- ・回転中に本品に無理に手・指など直接体に触れないで下さい。
- ・本材で使用する研削を行う場合は集塵装置、公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材を使用して研削を行う際は、保護メガネ等を使用すること。
- ・本材で研削の作業の際、万一、粉塵等が入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医（眼科医）の診断を受けること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないで下さい。
- ・使用回転数を超えた場合には、破損、破折して怪我をする恐れがあるので、表示使用回転数を厳守すること。回転数 MAX 4,000 回転以下で使用する。
- ・本品は、使用目的（用途）以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・保管は、直射日光、高温は避けて保管する。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・水分、腐食性薬剤（酸・アルカリなど）及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- ・株式会社 クエスト
〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
電話：088-538-9777 FAX：088-538-9888

製造業者

- ・TOBOOM SHANGHAI PRECISE
ABRASIVE TOOL CO., LTD
(中華民国)
- ・株式会社 クエスト