


**2021 年 07 月 (第3版)
* 2017 年 11 月 (第2版) (新記載要領に基づく改訂)

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000

アグリス鉗子

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状 (代表例)

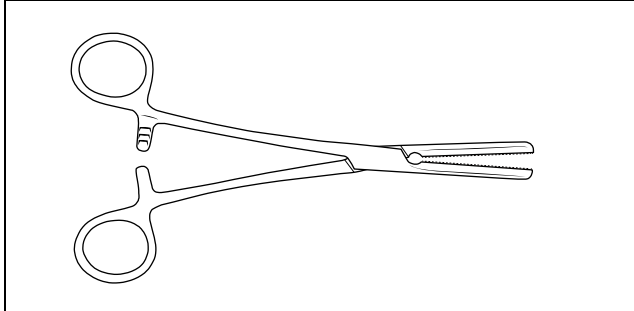

2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

先端部の2つの咬み合い部によって、把持、結合、圧迫又は支持する。ラチェット部が重なるとロックがかかり、重なる度合いが大きいほど、先端部の閉じる圧力は強くなる。

**【使用目的又は効果】

チューブを遮断するか、つまむための器具をいう。通常、検査室で使用するが医療施設で使用する汎用のものもある。本品は再使用可能である。

*【使用方法等】

1. 使用前に、必要に応じて洗浄・消毒する。
2. ハンドルを操作し、チューブを遮断もしくはつまむ。
3. ラチェットを開閉してロックする。

【使用上の注意】

**〈重要な基本的注意〉

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命が著しく低下する。
2. 一度閉じたラチェット部を開くとき、構造上一度閉じる方向に戻した後開くこと。
3. 本品は未滅菌のため、必要に応じて洗浄、滅菌等を行うこと。

*【保管方法及び有効期間等】

**〈保管方法〉

1. 水濡れに注意し、直射日光・紫外線・高温多湿を避けて、室温で保管すること。

- ** 2. 器具に機械的負荷を加えた状態で保管しないこと (ラチェット部は、開いた状態にしておく)。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス
福岡県八女市鶴池 477-1
TEL 0943-30-1177