

カットバン®


再使用禁止

※【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリル系粘着剤を塗布した塩化ビニル粘着テープとベンザルコニウム塩化物薬液で消毒したポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。

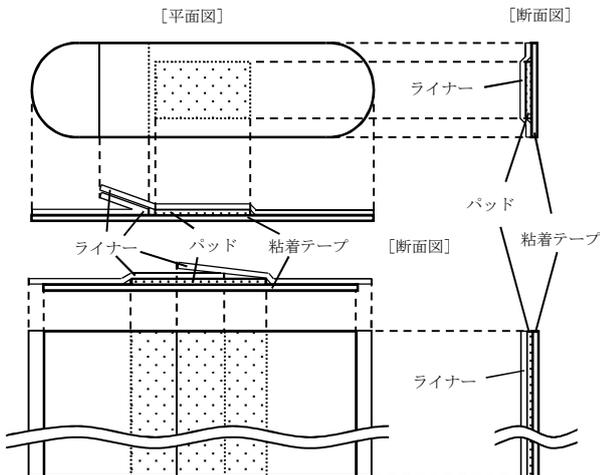

	全体サイズ (パッドサイズ)
Sサイズ	15mm×52mm (7.5mm×17mm)
Mサイズ	19mm×72mm (13mm×24mm)
Lサイズ	25mm×72mm (19mm×24mm)
パッチサイズ	38mm×38mm (19mm×19mm)
フリーサイズ	55mm×2.5m (19mm×2.5m)
	72mm×2.5m (31.5mm×2.5m)

*パッチサイズとフリーサイズは医家向けのみ。

※【使用目的又は効果】

創傷面の保護

※【使用方法等】

患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。

※【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

2. その他の注意

- 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。
- 2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- 3)粘着面を患部にはらないでください。

※【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1)直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 2)小児の手の届かない所に保管してください。

2. 有効期間

5年(自己認証による)
使用期限は外箱に記載

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：⊕ 祐徳薬品工業株式会社

[お問い合わせ窓口]

祐徳薬品工業株式会社 お客様相談窓口
〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1
TEL 0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)