

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN コード: 35531000

メディキットドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【包装】

1 セット


【形状、構造及び原理等】

吸水性又は撥水性を有することにより、手技時の汚染または感染防止を高める。

<ドレープ構造>

構造	構成
単層	（不織布）
二層	（不織布+ラミネートフィルム）
三層	（不織布+ラミネートフィルム+不織布）

<外観図>（代表図）

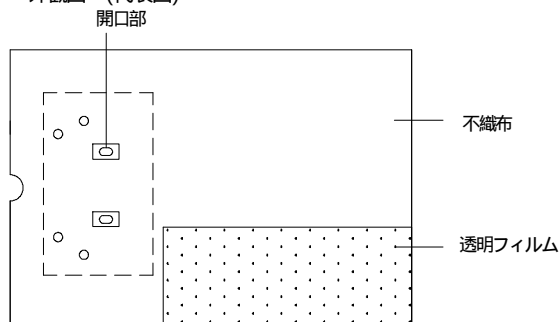

開口部、透明フィルムの無いものもある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：東郷メディキット株式会社
住所：〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6
電話番号：0982-53-8000

製造業者：東郷メディキット株式会社
住所：〒113-0034 東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号

販売業者：メディキット株式会社
住所：〒113-0034 東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号
電話番号：03-3839-0201

【使用目的、効能又は効果】

手技時に患者を覆い、切開部位や術野を確保するとともに、汚染または自己感染を防止するための保護的なカバーとして用いる不織布製の用具である。

【品目仕様等】

1. 外観：目視で検査するとき、異物の付着及び混入がないこと。
2. 無菌性保証水準（SAL）： 10^{-6}

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品を使用直前に滅菌袋から取り出す。
2. 無菌的に展開し、患者または対象物を覆う。
3. 開口部を有する場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、固定用の粘着テープ等で固定する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 包装に破損、汚染等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 包装の開封は、使用直前に行うこと。開封したらすぐに使用し、使用後は安全な方法で処分すること。
3. 本品の粘着テープが濡れた皮膚や創傷面に付かないようにすること。
4. 全ての操作は、無菌的に行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

[有効期間・使用の期限]

包装の使用期限を参照。（自己認証による）

