

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ JMDN コード: 35531000

メディキットドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

*＜使用方法＞

- ・再使用禁止

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東郷メディキット株式会社

住所：〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6

電話番号：0982-53-8000

販売業者：メディキット株式会社

住所：〒113-0034 東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号

電話番号：03-3839-0201


*【形状・構造及び原理等】

吸水性又は撥水性を有することにより、手技時の汚染または感染防止を高める。

<ドレープ構造>

構造	構成
単層	(不織布)
二層	(不織布+ラミネートフィルム)
三層	(不織布+ラミネートフィルム+不織布)

*＜外観図＞(代表図)

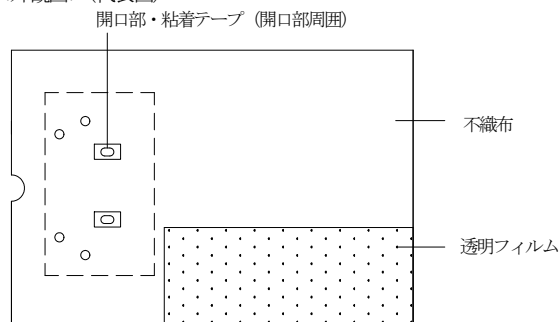

開口部、粘着テープ、透明フィルムの無いものもある。

*【使用目的又は効果】

手技時に患者を覆い、切開部位や術野を確保するとともに、汚染または自己感染を防止するための保護的なカバーとして用いる不織布製の用具である。

*【使用方法等】

1. 本品を使用直前に滅菌袋から取り出す。
2. 無菌的に展開し、患者または対象物を覆う。
3. 開口部を有する場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、固定用の粘着テープ等で固定する。

【使用上の注意】

*＜重要な基本的注意＞

本品の粘着テープが濡れた皮膚や創傷面に付かないようにすること。

*【保管方法及び有効期間等】

*＜保管方法＞

水濡れに注意し、紫外線 (直射日光・UV 殺菌灯など) や高温多湿を避けて保管すること。

*＜有効期間＞

包装の使用期限を参照 [自己認証による]

