



*2012年4月1日(第2版)
2008年12月18日(第1版)

医療機器認証番号:220ABBZX00375000

歯科材料 3 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用接着材料 70834000

クラリベース® 接着材

【禁忌・禁止】

本品の揮発蒸気にはジクロロメタンが含まれているため吸引しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構成品	形状	組成
接着材	液体	ジクロロメタン、ポリエチルメタクリレート

【付属品】

小筆・小分け用カップ

【作動・動作原理等】

本品は、義歯床用接着材料であり、義歯床表面の溶解を行い、義歯床と義歯床用硬質裏装材の接着を補助します。

【使用目的、効能又は効果】

【使用目的】

義歯床の裏装において義歯床へのレジンの接着に用いる。

【使用用途】

アクリルレジン床、スルホン樹脂床（ポリカーボネート樹脂製に限る）及び金属床の裏装における義歯床へのレジンの接着。

【品目仕様等】

項目	仕様	試験方法
PMMA 床に対する接着	5MPa 以上	ISO/TS 11405 準用

【操作方法又は使用方法等】

併用する材料について

本品と併用する材料は次のとおりです。
使用方法については、各製品の添付文書にしたがってください。

(1)硬質裏装材

義歯床用硬質裏装材「クラリベース®」を用いる。

(2)金属接着性プライマー

歯科金属用接着材料（例えば「アロイプライマー」）を用いる。

使用方法

①咬合調整・粘膜調整


通法にしたがい咬合調整、粘膜調整を十分に行います。

②適合状態の確認

歯科適合試験用印象材等を用いて義歯床の適合状態を確認します。

③裏装面のレジン削除

裏装を行う面全体をカーバイドバー等で一層削除し、新鮮面を出します。

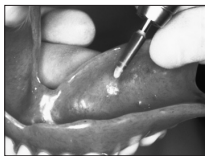

④金属接着性プライマーの塗布

金属に接する面がある場合には、その面に対し通法にしたがいサンドブラスト処理を行い、金属接着性プライマーを添付文書にしたがって塗布します。

⑤本品の塗布

小分け用カップに本品を移し取ります。小筆を用いて裏装面全体に塗布し、エアを吹き付け乾燥させます。



⑥硬質裏装材の適用

義歯床用硬質裏装材「クラリベース®」を添付文書にしたがい使用し、義歯床の裏装を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1) 本品には溶媒としてジクロロメタンを配合しているため、義歯床に塗布した後、ジクロロメタンを残留させないように十分に乾燥させること。また、その際は換気を行いマスクを装着して揮発蒸気を吸入しないように注意すること。

2) 使用した小筆、小分け用カップは放置すると硬化するので、必ず MMA（即重レジン）の液剤等で洗浄すること。

【使用上の注意】

(1)使用注意

①本品に含まれるジクロロメタンは大量に吸入した場合、めまい、昏迷及び頭痛といった症状が現れる危険性があるため、本品の使用の際には十分に換気を行いながら使用すること。また、口腔内での塗布、乾燥は絶対に行わないこと。

②本品が小分け用カップに残った場合はティッシュ等に含ませた後、ポリエチレンの袋に入れて廃棄すること。また、その際は換気を行いマスクを装着して揮発蒸気を吸入しないように注意すること。

③感染防止のため、小分け用カップ及び小筆は、清潔なものを使用し、また、使用後はアルコールで消毒すること。

④ポリカーボネート樹脂製義歯床以外のスルホン樹脂床（ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂等）への裏装は接着力が低下し、裏装材が剥離する恐れがあるので使用を避けること。

⑤性能低下の原因になるので、他の製品と混用しないこと。

⑥本品と「クラリベース®」の液剤を間違えないように注意すること。

⑦本品は、一部のプラスチック等を溶かすので注意すること。

⑧本品は揮発しやすいため、蓋を締め忘れないように注意すること。

⑨患者には日頃から義歯洗浄剤や軟らかい毛のブラシを使って、清潔に保つように指導すること。

⑩使用時の感染防止のため、患者間での交差使用は避けること。

⑪本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

⑫歯科医療有資格者以外は本品を使用しないこと。

(2)重要な基本的注意

①本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。

②本品の使用によりめまい、昏迷及び頭痛の症状が現れた術者においては、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。

③本品が患者の目、皮膚又は衣類に付着しないような措置を講じること。

④本品が目に入らないように使用時はタオルなどで患者の目を覆うこと。万一目に入った場合には、ただちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせるか、又は受けること。

- ⑤口腔内作業完了後は、ただちに口腔内を十分洗浄する(十分に洗口させる)こと。また、皮膚に付着した場合には、ただちに石鹼を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合には、ただちにアルコール(綿球)で十分ふき取ること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・本品は、高温、多湿又は直射日光を避けて2～25℃で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

- ・製造日から2年。
- ・本品は包装に記載の※使用期限までに使用すること。

※(例  2015-04 は
使用期限2015年4月 を示す。)

【包装】

〔単品包装〕

- ・クラリベース® 接着材 : 1本(20 mL)
- ・付属品
小筆(SO)

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売元:

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

フリーダイヤル:0120-330922

* 製造元:

クラレノリタケデンタル株式会社

販売元:

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161

「クラリベース」は、株式会社クラレの登録商標です。