

歯科材料5 歯科用接着充填材料
高度管理医療機器 水酸化カルシウム系窩洞裏装材 16182000

ダイカル

【形状・構造及び原理等】

本材は下記により構成される。

種類	形状	成分
ベースペースト	ペースト状	カルシウム塩
キャタリストペースト	ペースト状	水酸化カルシウム

色調: アイボリー、デンティンの2種類がある。

【使用目的、効能又は効果】

本材は、水酸化カルシウム配合製剤で、X線造影性がある。充填材料、セメント材などの充填下に、保護層を形成するための裏装材である。

[使用目的]

覆髄剤、ベース又はライナーとして使用する。

* 【品目仕様等】

[物理的性質]

粉液比(ベース/キャタリスト)	1.17: 1.00
練和時間 秒	10 以内
硬化時間 分	2~3(21℃)

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 形成後、窩洞は乾燥させてください。
- 2) ベースとキャタリストを付属の練和紙に同量、出しててください。
- 3) 直ちにダイカルアプリーケーター(ダイカル専用練和・充填器/オプション)で均一な色調になるまで十分に練和します。
- 4) 通常、練和は10秒以内に済ませ、直ちに窩洞に填入してください。
- 5) 過剰に填入、あるいは付着したダイカルは、スプーン型エキスカバーター、又はバーで除去してください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 使用後は、必ずキャップを締めること。
- 2) ペーストが湿気に触れないよう注意すること。
- 3) 練和時に、過剰練和はさけること。また、適切な性能を維持するため、硬化時間を調整する目的でキャタリストの量を加減しないこと。
- 4) 窩洞に充填するとき、多量の練和泥を1回で填入しないこと。
- 5) 口腔内では湿度と体温の関係から、表示の硬化時間より早く硬化するため、注意すること。
硬化時間は湿度と温度によって影響をうけるため、冷蔵庫から取り出したら、室温に戻してから使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①流動性を維持し、ダイカル本来の性質を高めるため、防湿下で使用する。
 - ②他の製品と混用しないこと。
 - ③本材は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
 - ④本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①水酸化カルシウム製剤に対し発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。
 - ②本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- ③本材及び練和物は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。
付着した場合には、すぐに綿球などで拭いた後、流水で洗浄すること。万一目にはいった場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

本材は、直射日光や高温多湿を避けて冷暗所に保管すること。(21℃以下)また、冷蔵庫保管も可。
本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限]

本材は、包装に記載の使用期限までに使用すること。
「記載の使用期限は製造業者データによる。」

【包装】

セット

- ① **ダイカル アイボリー スタンダードパッケージ**
ベースペースト アイボリー(13g) 1本
キャタリストペースト (11g) 1本
練和紙 1冊

- ② **ダイカル デンチン スタンダードパッケージ**
ベースペースト デンティン(13g) 1本
キャタリストペースト (11g) 1本
練和紙 1冊

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- *製造販売元 デンツプライ三金株式会社
選任製造販売 デンツプライ三金株式会社
住所 栃木県大田原市下石上 1382 番 11

製造先国 アメリカ
製造業者 デンツプライ インターナショナル インク
Dentsply

* [問い合わせ窓口]

インフォメーション・サポート部
カスタマー・サポート・センター
電話番号 0120-789-123
FAX 番号 0120-789-129