

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード: 34864000
テルファ サージカル パッド

再使用禁止


【警告】

1. 本品の使用前に、この添付文書のすべてを熟読すること。
2. 本品は、医師及び医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが使用すること。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

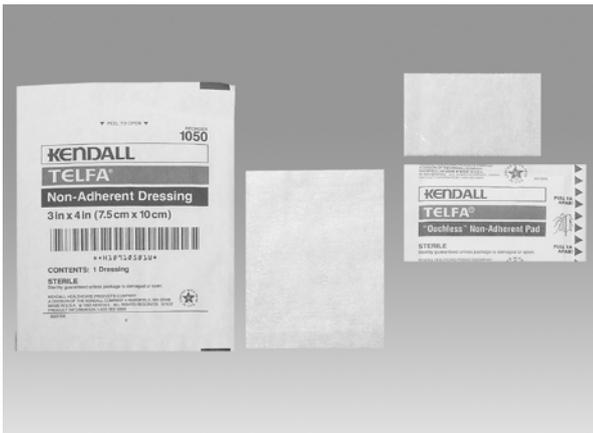

コットン製パッドを非固着性の薄いフィルムで包んである。皮膚に貼り付けるための粘着剤はない。

<原材料>

プラスチックフィルム : ポリエステル
不織布パッド : 綿布

【使用目的、効能又は効果】

身体の部位に用いる、プラスチック製の各種形状の絆創膏材である。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【品目仕様等】

吸水性：自重の9倍以上のこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. 非固着性フィルム面を傷口の上に当てる。
2. 粘着包帯等で本品を傷口の上に固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 本品は、単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
 - (2) 医師の指示以外で使用しないこと。
 - (3) 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
 - (4) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管すること。
2. 使用の期限
外装表示参照

【包装】

**カタログ番号	サイズ内訳	梱包単位/ケース	
		枚数	箱(枚数)
K1050WC	7.5×10cm (3"×4")	900	18箱 (1箱50枚入り)
K1169WC	7.5×15cm (3"×6")	750	15箱 (1箱50枚入り)
K1238WC	7.5×20cm (3"×8")	600	12箱 (1箱50枚入り)
K1961WC	5×7.5cm (2"×3")	2,400	24箱 (1箱100枚入り)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

**製造販売元：
コヴィディエンジャパン株式会社
〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
お問い合わせ先：0120-998-971

*外国製造業者名：
Covidien
(コヴィディエン)
アメリカ合衆国

販売元：
日本コヴィディエン株式会社
お問い合わせ先：0120-998-971