

- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ・滅菌包装の開封は使用直前に行うこと。また、全ての操作は無菌的に行うこと。
 - ・本品の刃面は鋭利なため、取り扱いに注意すること。
 - ・本品を投げたり、落下させたりしないこと。〔破損の原因となるおそれがあるため。〕
 - ・本品を曲げたり、折損させたりしないこと。〔本品が損傷するおそれがあるため。〕
 - ・本品使用時に必要以上の力を加えないこと。〔折損・曲がり等の原因となるおそれがあるため。〕
 - ・使用前の本品を鉗子等の固い物で直接挟まないこと。〔本品が損傷するおそれがあるため。〕
 - ・替え刃タイプのビーバーブレードをビーバーブレード用ハンドルに装着する際は真っ直ぐにビーバーブレード用ハンドルへ挿入し、しっかり固定されていることを確認後、使用すること。ビーバーブレード用ハンドルのコレットチャックが緩んでいる場合は使用しないこと。
 - ・ビーバーブレード用ハンドルへの、替え刃タイプのビーバーブレードの挿入が困難な場合は、他のビーバーブレード用ハンドル又は他の替え刃タイプのビーバーブレードに交換すること。
 - ・替え刃タイプのビーバーブレードは、必ずビーバーブレード用ハンドルに装着・固定して使用すること。他社のハンドルに装着して使用しないこと。
- **・整形外科用メスの替え刃タイプをビーバーブレード用ハンドルに装着し使用する場合、捻じったり、又過剰に力を加えないこと。〔てこの原理により刃の起点部にて折損するおそれがあるため。〕
- ・本品は1回限りの使用で必ず廃棄し、再滅菌・再使用はしないこと。また、未使用であっても一旦開封した製品は廃棄すること。
 - ・使用後は感染防止に留意して安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。

〈使用期限〉

外箱及び包装に記載。

【包装】

- 1本/箱
- 2本/箱
- 3枚/箱（替え刃タイプ）
- 3本/箱
- 4枚/箱（替え刃タイプ）
- 5本/箱
- 6枚/箱（替え刃タイプ）
- 10本/箱
- *20本/箱（替え刃タイプ）
- 24枚/箱（替え刃タイプ）
- 25枚/箱（替え刃タイプ）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目13番9号
Tel：03-5651-2861

外国製造業者：

ビーバービジテック インターナショナル インク
(Beaver-Visitec International, Inc.)
国名：アメリカ合衆国
ビーバービジテック インターナショナル リミテッド
(Beaver-Visitec International Limited)
国名：イギリス