

器具器械 58 整形用器具器械
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
スクレュードライバー

【形状、構造及び原理等】**【形状、構造】**

本品は、「MONOスクレュードライバー」①、「4-lobe スクレュードライバー」②の2種類があり、サイズは表1のとおり、S、M、Lの3種類がある。

形状は下図①、②の通りである。

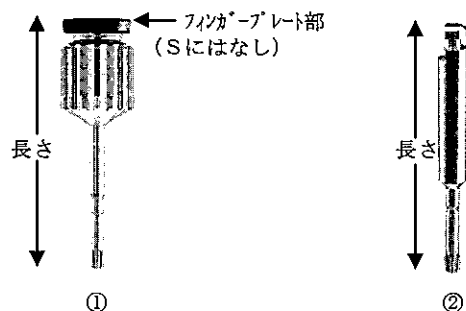


表 1 (mm)

種類	①	②
長さ		
S	14.5	17
M	22.2	22
L	28.2	28

【包装】

1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 モリタ

住所：大阪府吹田市垂水町3丁目3番18号 〒564-8650

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：トーマン メディカル AG

Thommen Medical AG

製造国名：スイス

Switzerland

【組成】

・ステンレス鋼

フィンガープレート部のみ：PEEK

【使用目的、効能又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

本品は、ヒーリングキャップ、ジンジバルフォーマー、アパットメントスクリュー等の着脱に使用する。

【操作方法又は使用方法等】

ヒーリングキャップ、ジンジバルフォーマー、アパットメントスクリュー等の上面にあるドライバーホールに差込み、回転させる。

【使用上の注意】

- (1) 本品は、記載の用途以外には使用しないこと。
- (2) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**【貯蔵・保管方法】**

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品は、滅菌されていないので必要に応じて使用前に滅菌すること。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌 115℃：30分間
 121℃：20分間
 126℃：15分間
- (2) 清掃にはナイロンブラシを使用し、ワイヤブラシ等は使用しないこと。
- (3) 洗浄後目視検査を行い、機能性に問題がないかどうかをチェックすること。