

機械器具 06 呼吸補助器
高度管理医療機器 成人用人工呼吸器 JMDNコード 42411000

「人工呼吸器 LTVシリーズ」の付属品 (ストレートアダプタ)

* 【警告】

◆ 本製品を使用する際は、本製品及び呼吸回路が外れないようにしっかり取付け、患者に使用する前に必ず人工呼吸器 LTVシリーズのリークテストを行い、呼吸回路が正常であることを確認してください[閉塞やリークにより換気障害が生じる恐れがあります]。

・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管環境条件＞

温度：-20～60℃

湿度：5～95% (非結露)

＜使用期間＞

50回の洗浄・消毒・滅菌、又は1年の使用(先に到達した方)

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・消毒・滅菌＞

1. 洗浄

- 1) ほこりを取り除いてください。
- 2) 35℃～65.5℃に温めたクレンジイムなどの酵素洗浄剤又は水と酢の割合1:1の酢水に最低10分間浸してください。
- 3) 清潔な水で2分間やさしくすすいでください。
- 4) 低流量空気源を使用して残留液を除去してください。

2. 消毒

- 1) ほこりを取り除いてください。
- 2) 2%グルタルアルデヒド溶液に20分間浸してください。
- ** 3) 清潔な水で2分間丁寧にすすいでください。
- 4) 低流量空気源を使用して残留液を除去してください。

3. 滅菌

- 1) 上記に従い洗浄してください。
- ** 2) 下記方法で滅菌を行ってください。
・オートクレーブ @ 140kPa、135℃、6分

＜洗浄・消毒・滅菌時の注意事項＞

- ◆ 超音波洗浄にかけないでください。
- ◆ 部品の損傷を避けるため、洗剤の残留物を完全に除去してください。
- ◆ 下記の消毒薬は使用しないでください[劣化の原因になります]。
 - ・ケトン
 - ・塩素化溶液
 - ・フェノール (> 5%)
 - ・塩素化炭化水素
 - ・無機酸
 - ・芳香族炭化水素
 - ・ホルムアルデヒド
 - ・次亜鉛素酸塩
 - ・2%を超えるグルタルアルデヒドを含有する液体剤

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

** 製造業者名(国名)：Vyaire Medical, Inc.

(バイエア メディカル社) (米国)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、寸法



** コネクタ 22M/15

2. 作動原理

* 人工呼吸器 LTVシリーズから送られてくるガスを通過させる呼吸回路を接続する、人工呼吸器 LTVシリーズ専用のアダプタ。

** 本品は、下記を使用目的とする「人工呼吸器 LTVシリーズ」の付属品です。

【使用目的又は効果】

* 様々な呼吸要求に従って長期の呼吸支持を行うのに十分な機能を備えた、肺胞換気を管理及び支援する自動循環器で、成人並びに小児の患者に用いることができる。圧力・容量循環モードを備えており、患者が無呼吸の場合に最低分時換気量を供給しながら、患者が自発呼吸することが可能である。集中治療室で使用するため特別に設計されたモニタ及びアラームを備える。

【使用方法等】

人工呼吸器 LTVシリーズの送気口と呼吸回路を本製品で接続する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- * ◆ 当社が推奨する呼吸回路に使用してください。
- ◆ 使用前に梱包状態を確認してください。万一、梱包が破れていたり、本製品が破損していた場合は使用しないでください。
- * ◆ 使用中に空気漏れなどが発生した場合は、速やかに交換してください。
- * ◆ 人工呼吸器 LTVシリーズについては、人工呼吸器 LTVシリーズの取扱説明書を参照してください。

＜その他の注意＞

- ◆ 保管場所については次の事項に注意してください。
 - ・水のかからない場所に保管してください。