

機械器具06呼吸補助器

管理医療機器

呼吸回路セット

JMDNコード 70566000

再使用禁止

「加温加湿器 VH-3000」の付属品(呼吸回路セット)

【禁忌・禁止】

<使用方法>


- ※ ◆再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・形状


- (1) 成人ディスポ回路デュアルヒートAF付き

注：150cm、吸気呼気加温、加温加湿チャンバー付

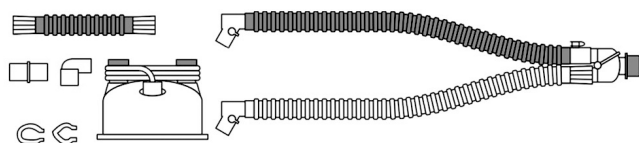


- (2) 成人ディスポ回路シングルヒートAF付き

注：150cm、吸気のみ加温、加温加湿チャンバー付

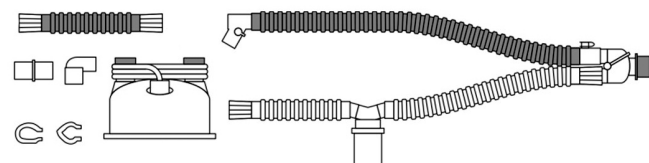


- (3) 小児ディスポ回路デュアルヒートAF付き

注：150cm、吸気呼気加温、加温加湿チャンバー付

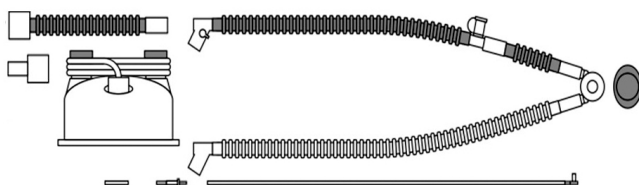

- (4) 小児ディスポ回路シングルヒートAF付き

注：150cm、吸気のみ加温、加温加湿チャンバー付

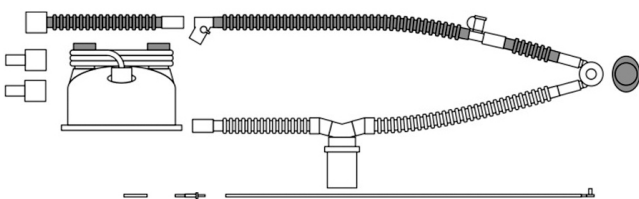

2. 原理

呼吸管を通じて、人工呼吸器から患者さんへガスを送気するものである。

ウォータートラップは、呼吸管と呼吸管の間に配置し、重力による自然落下を利用して呼吸管内に付着した水分を貯留させる。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) 包装を開封してください。包装は使用する直前に開封してください。包装が開いていたり、包装の封が不十分だったりした場合には使用しないでください。
- (2) 本品にひび割れなどの損傷がないことを確認してください。異常を見つけた場合には使用しないでください。
- (3) 各接続部がしっかり接続されていることを確認してください。
- (4) ウォータートラップのカップ部分の接続を確実にするための注意喚起として、同封のシールをウォータートラップのカップ部分に貼付けてください。その際、ウォータートラップ内の水量の目視確認の妨げにならないような位置に貼ってください。

2. 使用方法

- (1) 患者接続口についているキャップを外してください。
- (2) 機械側コネクタを人工呼吸器に接続してください。
- (3) 患者接続口を人工呼吸器用マスクや呼吸回路用コネクタなどに接続してください。このとき、本品が構成するガスライン全体で、閉塞又はリーク（漏れ）などがないことを必ず確認してください。
- (4) 使用中は、接続した人工呼吸器のモニター機能などにより、本品が構成するガスライン全体において閉塞又はリーク（漏れ）などの異常がないことを常にモニターしてください。万一異常が起きた場合には、直ちに使用を中止してください。

3. 使用後

- (1) 接続した患者さん／機器から取り外してください。
- (2) 感染防止に配慮し、国内関連法規に則った方法で廃棄してください。また、本品は単回使用であるため再使用しないでください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ※ ◆ 使用前に本品自体に破損がないことを確認し、各接続部がしっかり接続されていることを確認してください。
- ◆ 使用中に呼吸回路内に溜まった水分が気管内及び人工呼吸器・加温加湿器内に流入することのないように、呼吸回路構成全体に気をつけてください。
- ※ ◆ 加温加湿チャンバーには滅菌蒸留水以外を給水しないでください。また使用中加温加湿チャンバー内部に薬剤等、滅菌蒸留水以外の液体が入らないように注意してください [薬剤等が加温加湿チャンバー内に長期間残留することで、金属腐食や患者さんへ障害を与えるおそれがあります]。
- ※ ◆ ウォータートラップに半分以上水を溜めた状態で使用しないでください[水が回路内を閉塞させるおそれがあります]。

- * ◆ コネクター内側に内筒があるものには接続しないでください[回路が閉塞する可能性があります]。
- * ◆ 使用前に消毒・滅菌処理しないでください[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があります]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 室温下で保管してください。
- (2) 水に濡れないように保管してください。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分や硫黄分を含む場所での保管は避けてください。

2. 使用期限

個別包装に記載されています。使用期限を過ぎたものは、使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

- * 製造業者名(国名)：VADI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
YANGMEI(バディメディカルテクノロジー社)
(台湾)