

管理医療機器 酸素供給用経鼻カニューレ JMDNコード 35201000
機械器具 06 呼吸補助器

ネーザルインターフェイス

再使用禁止

【警告】

◆本製品の使用中は患者さんの状態を常にモニターし、閉塞、漏れ等に注意してください[換気障害が生じる恐れがあります]。


【禁忌・禁止】

- ◆再使用禁止。
- ** ◆滅菌、消毒をしないでください[本製品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります]。
- ◆本製品の周囲では火気厳禁としてください[爆発及び火災の原因となる恐れがあります]。

【形状・構造及び原理等】

* <外観・形状>

品番	製品名	サイズ
NH22-PAS	ネーザルカニューレ(2号)	S
NH23-PAS	ネーザルカニューレ(3号)	M
NH24-PAS	ネーザルカニューレ(4号)	L

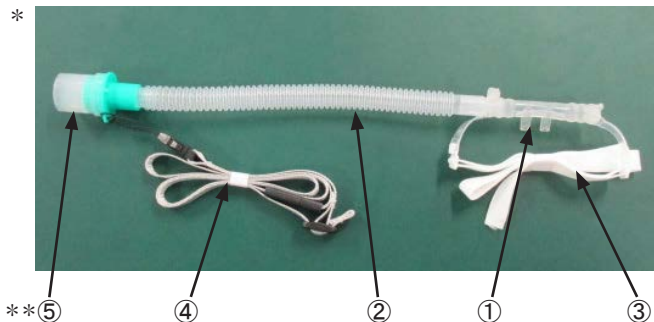

* <各部名称>

- ①プロング(鼻孔挿入部)
- * ②チューブ
- * ③ヘッドバンド
- * ④ストラップ
- ** ⑤22M/15Fコネクタ

<原理>

- ** 呼吸回路を介し本製品を酸素供給装置及びJIS T7207に適合する加温加湿器/加熱式加湿器に接続し、両外鼻孔経由で、患者さんに酸素を供給する。

【使用目的又は効果】

両外鼻孔経由で患者に酸素を供給する。

【使用方法等】

- 1) プロングとチューブを、使用中に外れないようしっかりと差し込みます。
- ** 2) 22M/15Fコネクタと呼吸回路等を接続します。
- 3) プロングを患者さんの鼻に取付けながら、ヘッドバンド及びストラップにより患者さんに適切な状態に調整し、固定します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ◆各接続部が外れないようしっかりと接続し、使用前に確認してください。
 - ◆チューブは、折れ、曲がないように固定してください[閉塞、漏れの恐れがあります]。
 - ◆使用中に患者さんの皮膚に異常が認められた場合は使用を中止してください。
 - ** ◆使用済みネーザルカニューレのプロング(鼻孔挿入部)に接触した場合は、直ちに手を洗い流してください。
 - ** ◆取付け、取外し時は、チューブを強く引張ったり、振じったりしないように注意してください[破損の恐れがあります]。
- ※本製品に天然ゴムラテックスは使用していません。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

温度：-40～60℃
湿度：30～95%

<使用期間>

7日間を目安に使用すること[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ** 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
- ** 製造業者名(国名)：GaleMed Corporation(ゲルメド社)
(台湾)