

機械器具 06 呼吸補助器  
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ JMDNコード 34838012  
**ファーマフレックス**

## 再使用禁止

## 【警告】

◆使用する前に本品の接続に誤りがないこと、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実にあり、接続部と回路にガス漏れや閉塞がないことを確認してください[適切な呼吸管理が行えないおそれがあります]。

## 【禁忌・禁止】

## ＜使用方法＞

- ◆再使用禁止
- ◆24時間を超えて使用しないでください。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 構成

## 1) ファーマフレックス


## (1) コネクタ

- ① エルボー 15F-22M/15M
- ② ダブルシーベルエルボーコネクタ ポート付 15M/15F
- ③ ダブルシーベルエルボーコネクタ 15M/15F

## (2) ファーマフレックス EX

- ① ファーマフレックス EX 15M/15F-22M
- ② ファーマフレックス EX エルボー 15M/15F-22M
- ③ ファーマフレックス EX 15M/15F
- ④ ファーマフレックス EX ダブルシーベル 15M/15F
- ⑤ ファーマフレックス EX ダブルシーベル ポート付 15M/15F

## 2. 形状、寸法

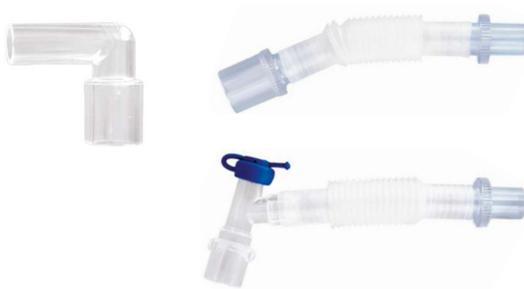

コネクタ径：15F、15M、22M  
(モデルにより異なります)

## 3. 作動原理

本品は、呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、及び他の呼吸回路のコンポーネントを接続する。

## 【使用目的又は効果】

呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いること。

## 【使用方法等】

1. 使用する人工呼吸器や呼吸回路等のコネクタの径を確認して適切な本品を選択し、確実に接続します。
2. 使用中は定期的に接続の状態を確認します。
3. 本品は24時間毎に新品に交換して使用します。

## 【使用上の注意】

## ＜重要な基本的注意＞

- ◆本品を滅菌しないでください[変形又は破損のおそれがあります]。
- ◆ISO5356-1に適合したコネクタ以外には接続しないでください[回路からのガス漏れにより適切な換気が行えないおそれがあります]。

## 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて常温にて保管してください。

## ＜有効期間＞

製造日から3年(自己認証による)

## ＜使用期間＞

24時間毎に交換してください。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社  
製造業者名(国名)：Pharma Systems Eesti OU  
(ファーマシステムズ)(エストニア)