

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 X線造影剤入りスポンジ 13705000

ラップスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

- (1) 体内へ留置しないこと
- (2) X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸以外のガーゼ部または柄を挟んで使用すること。

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社秋山製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-4

電話番号 03-3811-0802

製造元：Winner Medical Co.,Ltd.*


中華人民共和国*

Winner Medical(Jingmen) Co.,Ltd.**

中華人民共和国**

【形状・構造及び原理等】

(1) 形状、構造

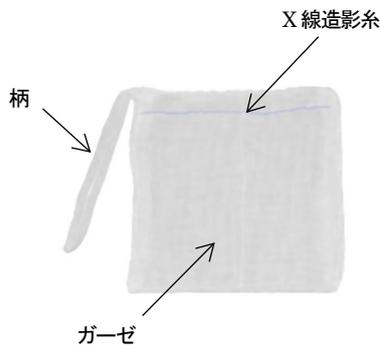

【発売元・お問い合わせ先】

ELP 株式会社秋山製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-4

電話番号 03-3811-0802

F A X 03-3812-8857

(2) 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。またX線造影糸により、X線での検知が可能である。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。

【使用方法等】

- (1) 本品は未滅菌であるので、使用前に高圧蒸気滅菌またはエチレンオキシドガス滅菌を行ってから使用すること。
- (2) 滅菌後は、再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- (1) 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- (2) 使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて、室温で保管すること。
- (2) 包装材に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- (3) 製品は改良されることがあるので、先入れ先出しを励行すること。
- (4) 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。

2. 有効期間

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より3年
[自己認証(当社データ)による]