

バリューマスク

再使用禁止

【警告】

使用上の注意

- (1) 閉塞及び漏れがないことを確認してから、使用すること。〔安全性、有効性の保障が出来ないため。〕
- (2) 使用中は閉塞及び漏れを起こさないよう、常に監視すること。〔重篤な有害事象を生ずる可能性がある〕
- (3) 有資格者以外は使用しないこと。

【禁忌・禁止】

併用医療機器

以下の製品とは併用しないこと。〔安全性、有効性の保障が出来ないため。〕

- ・ 確実な接続状態を維持できないもの
- ・ 接続により閉塞を起こすもの
- ・ 離脱が困難なもの

使用方法

(1) 再使用禁止

〔本製品は1回限りの医療機器であるので再使用した場合、製品が劣化して亀裂などの損傷が生じ、安全性が損なわれる恐れがある〕

(2) 滅菌・消毒処理をしないこと。

〔接続部に収縮・緩み・破損などが生じる可能性があり、離脱困難や漏れの原因となる〕

**【形状・構造及び原理等】

形状



規格表

品名	A※	B※	接続部径
バリューマスク No.1 新生児用 1915	約 63 mm	約 58 mm	15M
バリューマスク No.2 乳児用 1925	約 72 mm	約 66 mm	15M
バリューマスク No.3 小児用 1935	約 88 mm	約 78 mm	22F
バリューマスク No.4 成人用 S 1945	約 110 mm	約 95 mm	22F
バリューマスク No.5 成人用 M 1955	約 122 mm	約 90 mm	22F
バリューマスク No.6 成人用 L 1965	約 124 mm	約 105 mm	22F

※硬質部の寸法

原理

接続部に呼吸回路を接続し、患者の鼻と口を覆うようにクッション部を顔面に密着させることにより、揮発性麻酔剤(医療用ガスを含む)を吸入させる。

**【使用目的又は効果】

使用目的

揮発性麻酔剤を使用する麻酔施術時に、患者に麻酔剤を吸入させるために用いる。

**【使用方法等】

使用方法

- (1) 使用するマスクを選択する。
- (2) 使用前に、破損がないことを確認する。
- (3) 呼吸回路にマスクを接続する。
- (4) 麻酔器の始業点検を実施する。
- (5) 麻酔開始時に、エア注入口が患者の鼻のほうになる向きで、患者の鼻及び口が完全に覆われるように顔に当てる。
- (6) マスクを手で押さえるか、ヘッドバンドをフックリングに掛けて顔面に密着固定させる。

クッションの調節法

- (1) エア注入口に、シリンジを十分に押し込む。
- (2) クッションを膨らませたい場合はエアを注入し、縮ませたい場合はエアを抜いて調節する。
- (3) シリンジを抜く。

【使用上の注意】

使用方法

- (1) 破損などが認められるものは使用しない。
- (2) クッション中のエアが、適度に充填されていることを確認する。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

湿気を避けて保管する。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

処分するときは、医療廃棄物として廃棄する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称

アコマ医科工業株式会社
電話番号 03-3811-4151 (緊急時も同様)
WEB サイト <https://www.acoma.com>

外国製造業者の名称

キングシステムズ社
KING SYSTEMS CORPORATION
国名 アメリカ合衆国