

マニホールド

【警告】

使用上の注意

- (1) 閉塞及び漏れがないことを確認してから、使用すること。
- (2) 使用中は閉塞及び漏れを起こさないよう、常に監視すること。
[重篤な有害事象を生ずる可能性がある]
- (3) 有資格者以外は使用しないこと。

【禁忌・禁止】


併用医療機器

- (1) ユニバーサル F2 以外の製品。
- (2) 以下の製品とは併用しないこと。
 - ・ 確実な接続状態を維持できないもの
 - ・ 接続により閉塞を起こすもの
 - ・ 離脱が困難なもの

**【形状・構造及び原理等】

形状

品名/マニホールド P

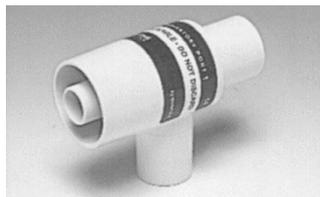

原理

麻酔器からのガスを、内管を通し患者へ送る。患者からの呼気を、外管を通してマニホールドからユニバーサル F2 呼吸接続蛇管を經由して麻酔器の呼気側へ通過させる。


**【使用目的又は効果】

使用目的

ユニバーサル F2 シリーズの構成品として使用する。

**【使用方法等】

接続図

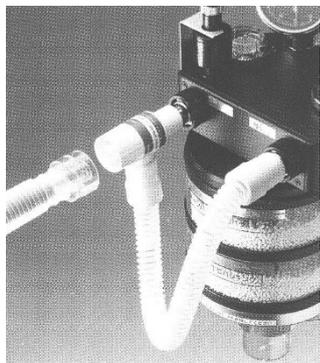

使用方法

- (1) 使用前に、破損などがいないか確認する。
- (2) 麻酔器の吸気口にマニホールドを装着する。

- (3) ユニバーサル F2 のコネクタ側を、マニホールドの二重管になった接続口に接続する。
- (4) マニホールドのもうひとつの接続口に、ユニバーサル F2 呼吸接続蛇管を接続し、麻酔器の呼気口と継ぐ。
- (5) ユニバーサル F2 と共に、麻酔器との接続が完了した時点で麻酔器の始業点検を実施する。

【使用上の注意】

併用医療機器

ユニバーサル F2 シリーズを併用する。

販売名：ユニバーサル F2

承認番号：21800BZX10094000

使用方法

- (1) 破損などが認められるものは使用しない。
- (2) 接続部に、絆創膏などのテープ類を巻き付けない。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 室温下で保管する。
- (2) 水に濡れないように保管する。
- (3) 以下の場所を避けて保管する。
直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所。
- (4) 重みでつぶれる、コネクタ部が破損するようなことがないよう配慮して保管する。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- (1) オートクレーブ滅菌 (134°C、4 分以上) をする。
- (2) オートクレーブ滅菌の可能回数は 25 回まで。
- (3) 処分するときは、医療廃棄物として廃棄する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*

製造販売業者の名称

アコマ医科工業株式会社

電話番号 03-3811-4151 (緊急時も同様)

Web サイト <https://www.acoma.com>

外国製造業者の名称

キングシステムズ社

KING SYSTEMS CORPORATION

国名 アメリカ合衆国