

## バイポーラ・ピンセット

### 【警告】

#### 使用上の注意

- (1) 術中に凝固機能が低下してゆくと感じられたときは、電気手術器の出力を上げる前に本品の接続状態などを確認すること。
- (2) 絶縁部のコーティングが劣化していないことを確認してから、使用すること。
- (3) 熱傷を防止するため、治療時以外は出力を発生させないこと。
- (4) 目的部以外に接触させないこと。
- (5) 有資格者以外は使用しないこと。

### 【禁忌・禁止】

#### 適用対象

心臓ペースメーカーを装着した患者

#### 使用方法

爆発性または引火性のある液体及びガスと併用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 組成

- (1) 本体：絶縁形
- (2) 先端部：ステンレススチール

#### 形状



規格表

| 品名                           | 全長     | 先端幅    |
|------------------------------|--------|--------|
| バイポーラ・ピンセット<br>ストレート 605-019 | 110 mm | 0.2 mm |
| バイポーラ・ピンセット<br>ストレート 605-039 | 160 mm | 1.0 mm |
| バイポーラ・ピンセット<br>ストレート 605-040 | 195 mm | 1.0 mm |
| バイポーラ・ピンセット<br>アングル 605-001  | 195 mm | 1.0 mm |
| バイポーラ・ピンセット<br>バヨネット 605-008 | 195 mm | 0.2 mm |
| バイポーラ・ピンセット<br>バヨネット 605-002 | 195 mm | 1.0 mm |

### 作動・動作原理

電気手術器にバイポーラ・ケーブルを経由してバイポーラ・ピンセットを継ぎ、電気手術器からの出力をバイポーラ・ピンセットへ伝える。

### \*\*【使用目的又は効果】

電気手術器のバイポーラ回路に接続し、組織の把持・凝固などに用いる。

### 効能又は効果に関連する使用上の注意

使用可能なバイポーラ電極のコード

販売名：バイポーラ・ケーブル

届出番号：13B1X00032AM1004

### \*\*【使用方法等】

#### 使用方法

- (1) 使用前に、汚れ、傷、変形などがないことを確認する。
- (2) 電気手術器に接続された、専用のバイポーラ・ケーブルに継ぐ。
- (3) 電気手術器の操作により、最低の出力から凝固を開始し、徐々に出力を調節する。
- (4) 使用後は、バイポーラ・ケーブルから外す。

### 【使用上の注意】

#### 使用方法

- (1) 手術・治療などの医療行為以外には使用しない。
- (2) 劣化・損傷が認められるものは使用しない。
- (3) 併用する電気手術器の操作について、十分に理解しておく。
- (4) 濡れた状態で、電気手術器と接続しない。
- (5) 抜き差しは接続部付近を持ち、無理に引っ張らない。
- (6) 必要以上の力を加えない。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- (1) 室温下で保管する。
- (2) 水のかからない場所に保管する。
- (3) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。
- (4) 重みにより破損が生じないように配慮する。
- (5) 滅菌後に保管する場合は、滅菌有効期間を管理する。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

#### 滅菌方法

- (1) バイポーラ・ケーブルから外す。
- (2) ピンセット先端に付着した組織や炭化物などを除去する。
- (3) オートクレーブ滅菌（134℃、20 分）をする。

#### 保守・点検に係る注意

- (1) 塩素系、ヨウ素系、強アルカリ性、強酸性の洗浄剤や消毒剤は、器械を腐食させる可能性があるため使用しない。
- (2) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）などは、器械表面を損傷させる可能性があるため使用しない。
- (3) 超音波洗浄、ホットエア滅菌は使用しない。
- (4) 乾燥させるときに、3 気圧以上の圧力をかけない。
- (5) オートクレーブは、製品の添付文書に記載された方法に従って使用する。
- (6) 洗浄剤、消毒剤などは、それぞれの製品の添付文書に記載された方法に従って使用する。
- (7) 処分するときは、医療廃棄物として廃棄する。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*

**製造販売業者の名称**

アコマ医科工業株式会社

電話番号 03-3811-4151（緊急時も同様）

Web サイト <https://www.acoma.com>

**外国製造業者の名称**

ボーワ社

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

国名 ドイツ