

デルタフロー吸引管

再使用禁止

【警告】

使用上の注意

有資格者以外は使用しないこと。

【禁忌・禁止】

併用医療機器

- 以下の製品とは併用しないこと。
- ・ 確実な接続状態を維持できないもの
 - ・ 接続により閉塞を起こすもの
 - ・ 離脱が困難なもの


使用方法

- (1) 再使用禁止
[本品は1回限りの医療機器であるので、再使用した場合、製品劣化による亀裂などの破損が生じ、安全性が損なわれる可能性がある]
- (2) 包装が破損しているものは使用しないこと。
[完全な滅菌状態が維持できていないため、感染が危惧される]
- (3) 消毒・滅菌処理をしないこと。
[接続部に、収縮・緩み・破損などが生じる可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

形状

品名/デルタフロー吸引管 チップ外径: φ8

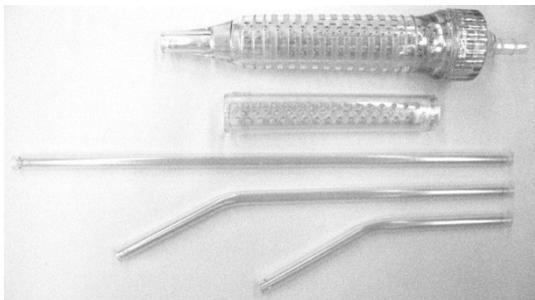

作動・動作原理

吸引器に接続した吸引チップ先端から、血液などを吸引する。吸引された血液などはフィルタを通過し、大きな骨片や固形物はフィルタ内に溜まり、小さな破片や液状物のみがホルダーに流れて吸引器側へ吸い込まれる。

**【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、単回使用の汎用吸引チップであり、外科的処置または治療中に吸引を調整・管理するために吸引装置に取り付ける器具である。

外科、脳外科、整形外科あるいは歯科などの手術及び処置などにおいて、血液、体液、分泌液または骨片などを吸引・排出することを目的に使用する。

**【使用方法等】

使用方法

- (1) ホルダーのキャップ側に、コネクティングチューブを中継して、吸引器本体と接続する。
- (2) 吸引チップを選択し、ホルダーの吸引口に差し込む。
- (3) 吸引器を作動させ、吸引力の確認・調節をする。
- (4) 吸引チップを創部に挿入し、吸引する。
- (5) キャップを外し、中のフィルタから吸引した組織を採取できる。

【使用上の注意】

使用方法

- (1) 開封後は長時間放置しない。
- (2) 挿入部に留置したままにしない。
- (3) 接続部に、絆創膏やテープ類を巻き付けない。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 室温下で保管する。
- (2) 水に濡れないように保管する。
- (3) 以下の場所を避けて保管する。
直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所。
- (4) 重みで破損しないように配慮して保管する。

使用期間

包装のラベルに記載された使用期限を守る。

【保守・点検に係る事項】

処分するときは、医療廃棄物として廃棄する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*

製造販売業者の名称

アコマ医科工業株式会社

電話番号 03-3811-4151

Web サイト <https://www.acoma.com>

外国製造業者の名称

F E ウノメディカル

FE Unomedical

国名 ベラルーシ