

添付資料 1

2021年 6月（新記載要領に基づく第1版）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B2X00219000001

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

医 療 ガ ー ゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。