

添付資料 1

2021年 6月（新記載要領に基づく第1版）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B2X00219000017

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌 プラス ー ゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと
- X線造影系を直接挟むと切れたり、抜け落ちて体内に残存する可能性があるため、X線造影系以外の部分のガーゼを挟んで使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社
大阪府柏原市大正2丁目9番6号
TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼにX線造影系を織り込んだものを滅菌したもの。

ガーゼ、縫い糸：綿100%

X線造影系（固定材：ポリプロピレン・ポリエステル）

造影剤：硫酸バリウム、着色剤：青色顔料）

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を用いている。

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、適宜使用してください。

【使用上の注意】

開封後は直ちに使用してください。

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないでください。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

2. 使用期限

使用期限（自己認証）をパッケージに記載