

医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

アルスエコノミーガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください
- 体内に留置しないでください

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

e-mail: office@asahi-eizai.co.jp

【形状、構造及び原理等】

レーヨン70%、ポリエステル30%の不織布です。

本品には切り込みのあるタイプもあります。

【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布
からなる被覆、保護材です。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜滅菌して使用してください。

創傷面には滅菌して使用してください。

滅菌はEOG滅菌ができます。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないでください。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

【保管方法】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管
すること。