

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
アルス ニトリルグローブ プラス

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

下さい。

【保管方法及び有効期間等】

【形状、構造及び原理等】

本品はニトリルブタジエンゴムを主成分とした、未滅菌手袋になります。左右兼用でパウダーフリーの未滅菌製品になります。

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温多湿、直射日光、X線を避け、涼しく風通しの良い場所で保管してください。保管場所によっては製品の品質に影響を及ぼす恐れがあります。

2. 使用期限

製造年月日より3年

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【使用方法等】

化粧箱のミシン目に沿って取り出し口を切り取り、本品を取り出してください。

取り出した本品を手に装着してご利用ください。

装着時に過剰な力を加えることで穴が開いたり、破れたりする可能性があります。

【使用上の注意】

手袋のご使用時には使用上の注意に従ってご使用下さい。

本品は単回使用製品になります。繰り返してご使用しないで下さい。

本品は検査・検診用になります。手術ではご使用できません。

刃物や鋭利な物に触れると破損する恐れがございます。破損時は使用を中止して下さい。

薬品や溶剤によっては変色、膨張、浸透、破損の可能性がございます。

本品を装着して熱いものに触れないようにして下さい。

ご使用時に異常を感じましたら、早急にご使用を中止して