


アイマスク

【警告】

本体を加熱しすぎると低温やけどを発症する恐れがあります。適切な加熱温度、加熱条件で使用すること。

【形状、構造及び原理】

＜形状＞

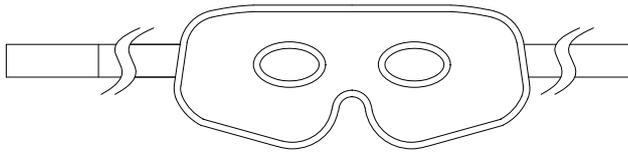

＜構造＞

本品は、アイマスク形状で、本体のジェル部分に貴陽石が配合されている。

＜原理＞

本体のジェル（加熱媒体）を加熱装置で加熱したものを患部に当て、温熱治療を行う温熱用パックであり、冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックとしても使用できる。本品は再使用可能である。また、本体のジェルに配合された貴陽石から放射される遠赤外線の温熱効果によっても温熱治療が可能である。

【使用目的又は効果】

本体のジェル（加熱媒体）を加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う温熱用パックであり、冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックとしても使用できる。本品は再使用可能である。

【性能及び安全性に関する規格】

＜性能＞

項目	規格	試験方法
外観	(1) 破れ、糸のほつれ、色ムラ等がないこと (2) 形状が寸法どおりであること。	目視及び指触によって確認する
機能	粉碎された貴陽石がジェルに配合されていること。	目視及び指触によって確認する

【使用方法】

1. 冷湿布として使用

- ① 本体を冷蔵庫の冷蔵室で冷却する（約1時間）。
- ② 通常のアイマスクのように取付けて使用する。

2. 温湿布として使用

※電子レンジによる場合

- ① 本体を電子レンジで加熱する（500W 10秒）。
- ② 通常のアイマスクのように取付けて使用する。

※貴陽石の効果による場合

- ① そのまま、アイマスクのように取付けて使用する。

【使用上の注意】

1. 温熱用パックとしての目的以外に使用しないこと。
2. 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた時は、使用を直ちに中止すること。
3. 使用前に治療器に異常がないか確認してから使用すること。
4. 加熱媒体は分解しないこと。
5. 使用中に身体に異常を感じた時は使用を直ちに中止すること。
6. 治療器に異常を感じた時は使用を直ちに中止すること。
7. 洗濯は手洗い、日陰干しのこと。

【保管方法及び有効期間】

＜保管方法＞

1. 水濡れ、湿度の高いところは避けて、風通しのよい場所に保管すること。
2. 子供の手の届く場所に保管しないこと。

【包装】

包装単位：1袋1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社朝日

住所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号

製造業者：株式会社朝日

住所：東京都小平市上水本町二丁目18番20号