

機械器具 60 歯科用エンジン
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

AG セラミル シリーズ Ceramill matik

【禁忌・禁止】

1. 扉を開けるときのには、装置が完全に停止していることを確認すること。内部には高速で回転する工具（切刃）があり、手に触れると怪我する恐れがあります。
2. 「使用説明書」に記載された用途・目的以外に本装置を使用しないこと。予期しない事故になる可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本装置は以下のユニットにより構成されている。
(1) 本体
(2) 周辺機器
(3) コンピュータ
2. 電気的定格
(1) 電源電圧：100-230 V
(2) 周波数：50/60 Hz
(3) 消費電力：400 W (Ceramill matik)
200 W (Ceramill cleanstream)
3. 原理
歯科修復物の外形を設計データに従って切削加工するために用いる。

【使用目的、効能又は効果】

複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計(CAD)又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法等】

- (1) 装置の電源を ON にする。
- (2) コンピュータを立ち上げる。
- (3) 本体の前面窓を開ける。
- (4) ブランク（被加工物）・工具・アタッチメントを本体に取り付け、本体の前面窓を閉じる。
- (5) コンピュータを操作し、本体に加工プログラムを送る。
- (6) 本体の操作ボタンを押してプログラムを開始し、加工を開始する。
- (7) 加工が終了すれば、本体の操作ボタンを押してプログラムを終了する。
- (8) 本体の前面窓を開け、ブランク（被加工物）・工具・アタッチメントを取り外す。
- (9) 別の加工を行うときは、(4)～(8)を繰り返す。
- (10) 本体の前面窓を閉じる。
- (11) コンピュータを終了操作した後、装置とコンピュータの電源を切る。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

この装置はコンピュータ支援設計(CAD)とコンピュータ支援製造(CAM)のシステムの一部として使用します。使用に際して、次の点にご注意ください。

1. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
(1) スイッチ、表示器の点検を行い、機器が正常に作動することを確認すること。
(2) アースが完全に接続されていることを確認すること。
(3) 全てのコードの接続が正確かつ完全であることを確認すること。
2. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
(1) 機器全般に異常のないことを監視すること。
(2) 機器に異常が発見された場合には、機器の動作を止めるなど、適切な処置を講ずること。

3. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
(1) 定められた手順により使用前の状態に戻し、電源を切る。
(2) コード類の取り外しに際して、コードを持って引抜くなど無理な力をかけないこと。
(3) 付属品、コード、導子などは清浄にした後、整理してまとめておくこと。
(4) 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。

4. 故障したときは勝手に触らないで適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

5. 機器は改造しないこと。

6. その他
この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。弊社営業部にご連絡をいただくか、地方自治体毎に定められた条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄処分を依頼して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる場所に保管しないこと。
(3) 傾斜、振動、衝撃などの影響を受ける場所に保管しないこと。
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 耐用期間
適正な保守点検及び修理が行われた場合に限り、5年間とする。（自己認証）
ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差異が生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 機器は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社
住 所：〒601-8203 京都市南区久世築山町 376 番地の 3
電 話 番 号：075-921-4330
F A X：075-921-6675
U R L：www.asahi-xray.co.jp
e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp
受 付 時 間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）
製 造 元：アマンギルバッハ(Amann Girrbach AG)
国 名：オーストリア

「使用説明書」を必ずご参照下さい