

歯科材料 7 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

AG セラミル シリーズ Ceramill WAX

【形状、構造及び原理等】

外観形状・色の異なる以下の8種類の型式がある。

Dental Arch 型			
品番	型式	厚さ	
Wax	760307	Ceramill Wax grey 71 XS (Ceramill Wax 71 XS)	13 mm
	760302	Ceramill Wax grey 71L (Ceramill Wax 71L)	20 mm
Wax white	760315	Ceramill Wax white 71 XS	13 mm
	760313	Ceramill Wax white 71L	20 mm

Disk 型			
品番	型式	厚さ	
Wax	760524	Ceramill Wax 98×14N	14 mm
	760525	Ceramill Wax 98×20N	20 mm
Wax white	760527	Ceramill Wax white 98×14N	14 mm
	760528	Ceramill Wax white 98×20N	20 mm

原材料: ポリエチレンワックス、その他

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型を作製するのに用いる。

【使用方法等】

- (1) 加工装置・コンピュータの電源をONにして装置を立ち上げ、前面窓を開ける。
- (2) 本品(被加工物)・アタッチメントを加工装置に取り付け、本体の前面窓を閉じる。
- (3) コンピュータを操作し、加工装置に加工プログラムを送る。
- (4) プログラムを開始し、加工を開始する。
- (5) 加工が終了すれば、加工装置の前面窓を開け、本品・アタッチメントを取り外す。
- (6) 本品を型に埋没し、更に湯道を設ける。
- (7) 型を焼成する。本品は焼成時に昇華する。
- (8) 完成した型を使用して、歯科用金属の鑄造物を製作する。
- (9) 鑄造物を仕上げ調整した後、患者に装着する。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 再溶解して使用しないこと。
- (2) 本品は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないよう注意すること。
- (3) 過度の加熱、加熱したままでの放置はしないこと。
- (4) 本品は、歯科医療、歯科技工有資格者のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の25℃以下で保管すること。
- (2) 歯科従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

[有効期間]

60ヶ月[自己認証(製造元データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: 朝日レントゲン工業株式会社

住所: 〒601-8203

京都市南区久世築山町376番地の3

電話番号: 075-921-4330

FAX: 075-921-6675

URL: www.asahi-xray.co.jp

e-mail: sales@asahi-xray.co.jp

受付時間: 9:00~17:00(休日・弊社休業日を除く)

製造元: アマンギルバッハ(Amann Girrbach AG)

国名: オーストリア