

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

3D プリンター用レジン NextDent Model 2.0

【形状、構造及び原理等】

[概要]

本品は、歯科用模型等を作製するために用いる。

[成分]

エトキシ化ビスフェノール A ジメタクリレート、その他

[色調]

桃色、白、グレー、黄土色、

[原理]

本品は樹脂系材料であり、3D プリンターにより造形し、光重合により硬化する。

【使用目的又は効果】

歯科用模型の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品を攪拌する。
- (2) コンピュータで設定を行い、造形データを送信する。
- (3) 攪拌したレジンをレジントレイに注入する。
- (4) 造形を開始する。
- (5) 造形終了後、造形物を 3D プリンターから取り出し、洗浄する。
- (6) 洗浄後、造形物を硬化する。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 本品は換気の良い場所で使用すること。
- (2) 本品は日光、蛍光灯などの影響を受けるので、攪拌して取り出した分は直ぐに使用すること。使用後は直ちに蓋を閉めること。
- (3) 本品の使用時、医療用(歯科用)手袋(ニトリル製)、及び保護メガネ等を着用し、皮膚への付着、目に入らないようにすること。

[重要な基本的注意]

- (1) 本品を口腔内に使用しないこと。
- (2) 本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏反応が現れた場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けるさせるか、または受けること。
- (3) 本品は皮膚に付着しないように注意すること。万一、皮膚に付着した場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- (4) 本品は目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

その他の注意

- (1) 造形物のサポート部分の除去、修整時には造形物を変形させないように注意すること。
- (2) 本品は可燃性であるため、火気の近くでの使用、置くことは避けること。
- (3) 本品を使用目的以外で使用しないこと。
- (4) 他の製品と混用して使用しないこと。
- (5) 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- (6) 廃棄する際には、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 本品は 25℃以下、冷暗所で保管すること。
- (2) 本品は、高温、直射日光を避けて、保管すること。
- (3) 歯科従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

[有効期間]

- (1) 容器に記載[自己認証]
- (2) 容器に記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 朝日レントゲン工業株式会社

住 所 : 〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電 話 番 号 : 075-921-4330

F A X : 075-921-6675

U R L : www.asahi-xray.co.jp

e - m a i l : sales@asahi-xray.co.jp

受 付 時 間 : 9:00~17:00 (休日・弊社休業日を除く)

製 造 元 : Vertex - Dental B.V.

国 名 : オランダ

「使用説明書」を必ずご参照下さい