

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 35761000

Aidite EZPRINT キュアユニット CL-200

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)に基づき、コンピュータ支援製造(CAM)を行い、製作された高分子材料（造形物）を光重合する。

2. 電氣的定格

定格電圧：100V～120V
周波数：50HZ / 60HZ
消費電力：240W

3. 形状、構造及び寸法

寸法：幅 320mm×奥行 320mm×高さ 330mm
質量：15kg

4. 原理

チャンパー内部に取付けられたランプの光により高分子材料を重合する。

【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品の電源を入れる。
- (2) 重合する高分子材料（造形物）をチャンパーに入れる。
- (3) 時間等の設定を行い、重合を開始する。
- (4) 重合終了後、チャンパーから造形物を取り出す。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 必ず操作手順に従って使用すること。
- (2) 感電の恐れがあるため、濡れた手で操作しないこと。
- (3) 訓練を受けた担当者または、保守担当者以外の者は使用しないこと。
- (4) 使用しないときは電源プラグを抜くこと。
- (5) 電源を切った後は、本品を清掃し、電源を入れる前に乾燥させること。
- (6) 機器を分解、修理、改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 保管条件：温度 20～28℃、湿度 50%以下
- (2) 水のかからない場所に保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (4) 傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意して保管すること。
- (5) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生じる恐れのない場所に保管すること。
- (6) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本器の点検、清掃、ランプ交換を行うときは、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- (2) 機器及び部品は、トレーニングを受けた者が必ず定期的保守点検を行うこと。
- (3) しばらく使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社

住 所：〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電 話 番 号：075-921-4330

F A X：075-921-6675

U R L：www.asahi-xray.co.jp

e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp

受 付 時 間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）

製 造 元：Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

国 名：中華人民共和国

「使用説明書」を必ずご参照下さい