

歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

Aidite EZPRINT レジン Dental Model Light Gray

【形状、構造及び原理等】

〔概要〕

本品は、歯科用模型等を作製するために用いる。

〔成分〕

ウレタンジメタクリレート、その他

〔色調〕

ライトグレー色（薄灰色）

〔原理〕

本品は樹脂系材料であり、3D プリンターにより造形し、光重合により硬化する。

【使用目的又は効果】

歯科用模型の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- (1) 本品を攪拌する。
- (2) コンピュータで設定を行い、造形データを送信する。
- (3) 攪拌したレジンレジンをレジントレイに注入する。
- (4) レジンに紫外線を照射して造形を開始する。
- (5) 造形終了後、造形物を 3D プリンターから取り出し、洗浄する。
- (6) 洗浄後、造形物を硬化する。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 本品は換気の良い場所で使用すること。
- (2) 本品は日光、蛍光灯などの影響を受けるので、攪拌して取り出した分は直ぐに使用すること。使用後は直ちに蓋を閉めること。
- (3) 本品の使用時、医療用（歯科用）手袋（ニトリル製）、及び保護メガネ等を着用し、皮膚への付着、目に入らないようにすること。

〔重要な基本的注意〕

- (1) 本品を口腔内に使用しないこと。
- (2) 本品は歯科医師、歯科技工士及び歯科医療従事者以外は使用しないこと。
- (3) 本品の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏反応が現れた場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けるさせるか、または受けること。
- (4) 本品は皮膚に付着しないように注意すること。万一、皮膚に付着した場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- (5) 本品は目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

その他の注意

- (1) 造形物のサポート部分の除去、修整時には造形物を変形させないように注意すること。
- (2) 本品は可燃性であるため、火気の近くでの使用、置くことは避けること。
- (3) 本品を使用目的以外で使用しないこと。
- (4) 他の製品と混用して使用しないこと。
- (5) 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- (6) 廃棄する際には、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 本品は有効期間 18 ヶ月
15～28℃、冷暗所で保管すること。
- (2) 本品は、高温、直射日光を避けて、保管すること。
- (3) 歯科従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

〔有効期間〕

- (1) 容器に記載〔自己認証〕
- (2) 容器に記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社

住 所：〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電 話 番 号：075-921-4330

F A X：075-921-6675

U R L：www.asahi-xray.co.jp

e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp

受 付 時 間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）

製 造 元：Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.

国 名：中国