

歯科材料(07) 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

ボナクラウンワックス **

【形状・構造及び原理等】

* [種類]

本品には、以下の種類がある。

種類	色調	用途	商品番号
フィットグレー	グレー	クラウン&ブリッジの 歯冠形成	000107
オベークデンチン	歯冠色		6014540
シェードA	ビタシェードA		000091
シェードB	ビタシェードB		000092
シェードC	ビタシェードC		000093
シェードD	ビタシェードD		000094
CAD/CAM スキャンワックス	グリーン		000090
サービカルワックス	レッドピンク	クラウン&ブリッジの 辺縁部	11510
ブロッキングアウト ワックス	ピンク	アンダーカット、 リリーフ部位に使用 する	7091

[原理]

熱したインスツルメント等を使用し、軟化させ、補綴物の
蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製の
キャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

- ・ 模型材の表面にワックス分離材を塗布する。
- ・ ワックスインスツルメントなどを用いて、少量ずつ適温に
溶かしたワックスを盛上げていく。
- ・ カービング・埋没は通法に従い作業する。
- ・ サービカルワックスは、蠟型作製時のマージン部分に使用
する。
- ・ ブロッキングアウトワックスは、アンダーカット、リリー
フ部分に使用する。

【使用上の注意】

- ・ 本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように
注意すること。
- ・ 使用場所には消火器を備えること。
- ・ 他の製品と混用しないこと。
- ・ 本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・ 本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った
時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 室温保管
- ・ 本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる
場所)に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・ 本製品は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に多量に
保管しないこと。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・
管理すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社

製造業者 al dente Dentalprodukte GmbH

国名 ドイツ