

ボナロックス

【形状・構造及び原理等】

組成 酸化アルミナ
外観 白色の粒状物体

* 【使用目的又は効果】

歯科技工物製作過程において、サンドブラスト材料として技工物の表面処理や酸化皮膜・石膏・埋没材の除去に用いる。

* 【使用方法等】

投射研削機械（サンドブラスト機）に投入して研削作業を行なう。
必ずサンドブラスト機の操作手順に従って正しく使用すること。

【使用方法に関連する使用上の注意】

【使用上の注意】

- (1) サンドブラスト機によっては使用可能なブラスト材料の粒径が異なるため、事前に必ず使用のサンドブラスト機が本品に適合しているかどうかを確認すること。
(本品の粒径は被包部に記載)
- (2) 研削作業の際には粉塵が発生する。
粉塵による人体への影響を避けるため、防塵マスク、手袋等の適切な防塵装備の使用と集塵装置の設置を義務付けること。
また、眼の損傷を防ぐため、保護めがねを着用すること。
- (3) 循環式サンドブラスト機で使用する場合、連続使用により本品自体が粉碎して本来の表面処理能力が次第に得られなくなる。
この為、過度の連続使用は行なわないこと。
- (4) 塊が発生した本品を直接使用しないこと。
サンドブラスト機のノズル部が目詰まりを起こす可能性がある。
- (5) 本品が床などにこぼれた場合は滑りやすいので大変危険である。
速やかに清掃すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
- ・保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エーピーエス株式会社
製造業者 Interdent d.o.o.
国名 スロベニア